



# ULTIMA M7-W

## Руководство пользователя

### Наименование деталей



### Правила использования

–Режим работы через адаптер  
(1) Подключите адаптер постоянного тока (DC) к разьему.  
(2) Вставьте адаптер постоянного тока (DC) в розетку переменного тока (AC).

–Режим работы через батарею  
1) Включите Dr.pen напрямую с полностью заряженной батареей.  
2) Зарядка батареи: вставьте адаптер в розетку и подключите его к зарядному устройству. Индикатор батареи загорится красным. При полной зарядке индикатор загорится зеленым.



3) Батарея заряжается полностью примерно за 4 часа.  
4) Батарею можно заряжать во время работы прибора.

### Правила использования

2. Подготовка к работе  
(1) Достаньте картридж из упаковки.  
(2) Вставьте в круглый слот 1 слот 2, надавите на картридж горизонтально до конца.

(3) Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.  
(4) Регулировка длины должна производиться после включения прибора.  
(5) Если вы хотите извлечь картридж, поверните его по часовой стрелке и вытолкните горизонтально, подгоняя круглые слоты (1 и 2) друг к другу.

### (3) Регулировка длины

Вы можете отрегулировать длину картриджа, поворачивая регулировочное кольцо по часовой или против часовой стрелки. Если повернуть его по часовой стрелке, длина будет больше. Если повернуть его против часовой стрелки, длина будет меньше.



### Правила использования

3. Регулировка скорости  
(1) Регулировка скорости и ВКЛ/ВЫКЛ



### (2) 5 уровней контроля скорости

Нажимайте на переключатель в течение 2 секунд, чтобы открыть прибор. Он начинает с минимальной скорости до максимальной при первом включении питания. Скорость циклически меняется от низкой до высокой. Когда вам нужно остановить прибор, пожалуйста, нажимайте на переключатель в течение 2 секунд.

Чем выше частота мигания светового индикатора, тем выше скорость

### Предостережение

	Переменного тока		Серийный номер
	Постоянного тока		Представитель в ЕС
	Оборудование класса II		СЕ маркировка
	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации		Производитель
	Дата изготовления		Незаземлённая рабочая часть

### Спецификация

**1. Изделие**  
Прибор для штампового микромассажа с помощью электрического возвратно-поступательного механизма

**2. Принцип действия**  
Прибор помогает более эффективно использовать антивозрастные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сыворотки в кожу. Без инъекций!

**3. Классификация**  
–Класс защиты от поражения электрическим током: оборудование класса II  
–Степень защиты от поражения электрическим током: незаземлённая рабочая часть  
Степень защиты от попадания воды: стандартное оборудование (IPX0)  
–Режим работы: непрерывная работа

**4. Спецификация**

1) Наименование изделия: Автоматический электрический штамповый массажёр для лица Ultima M7  
2) Модель: Ultima M7  
3) Батарея: 5В, 1000 мА  
4) Вес: Основной корпус 76 г  
5) Размер: 150\*23 (мм)

### Гарантия

	Почаюйте, обязательно ознакомьтесь с вставшим руководством перед использованием прибора и следуйте инструкции.
	Противопоказания: 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся повышенной выделением тепла; 2. Аллергия и гемифилия; 3. Механизм на лице; 4. Высокая температура; 5. Постоянные вены в вращу; 6. Прием лекарственных препаратов; 7. Возраст до 18 лет.
	Не подпайте прибор к питанию, отличному от 220В переменного тока. Это может привести к повреждению шин или неисправности прибора.
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (душ с увлажненным воздухом). Это может привести к неисправности.
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контролер и корпус. Это может привести к неисправности.
	Не прикасайтесь к устройству и не оголяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к порыванию электрическим током.
	Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к пожару (обязательно замените его на новый).
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут ударить кожу.
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.
	Обязательно осматривайте прибор на предмет неисправности. Если обнаружены какие-либо проблемы, устраните их.
	Нельзя, кроме оператора, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.

### Упаковочный лист

Прибор	1 шт.
Картриджи	2 шт. нано картриджа
Руководство	1 шт.
Адаптер	1 шт.

### Обслуживание

1. Гарантия на детали Dr.pen составляет 6 месяцев с даты их изготовления.  
2. Мы обеспечиваем бесплатный ремонт наших изделий в течение 600 часов (гарантия) со дня их приобретения. Если какое-либо наше изделие имеет повреждения или брак, мы обеспечиваем ремонт или замену.  
3. Если неисправности произошли по следующим причинам, вы должны оплатить ремонт даже в течение гарантийного срока.  
–Неисправности из-за небрежного обращения пользователя с прибором,  
его самовольного ремонта или переделки  
–Неисправности из-за ремонта человеком, не являющимся техническим специалистом авторизованного производителем дилерского магазина или центра обслуживания клиентов  
–Неисправности или повреждения, вызванные ударами во время транспортировки  
–Неисправности, вызванные использованием аксессуаров или опций, неавторизованных производителем

**1. Общее техническое обслуживание**  
–Держите прибор выключенным. Протирайте его поверхность сухой тканью.  
–Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.  
–Не доверяйте проверке, ремонт или переделку прибора непрофессионалу.  
**2. Регулярный осмотр**  
–Обязательно осмотрите прибор и адаптер перед использованием.  
–Если вы не использовали прибор в течение длительного времени, убедитесь, что он работает должным образом и безопасно.

# ULTIMA M7-W

## Руководство пользователя