

Artmex V11
MTS & PMU System



АППАРАТ ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
И ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



No.	Описание
1	Место размещения наконечника
2	Интерфейс педали
3	Интерфейс наконечника
4	Интерфейс блока питания
5	Выключатель
6	Педаль



При выполнении перманентного макияжа (PMU) цветные пигменты, закаченные в иглу, вводятся в кожу возвратно-поступательно.

Процедура микроидлинга (MTS) помогает коже впитывать медицинские препараты путем раздражения кожи.

Основы эксплуатации

1. Соедините детали с основным корпусом Artmex V11.



Рис 1



Power

Рис 2

Шнур адаптера соедините с интерфейсом блока питания
(Делайте, как показано на рисунках 1 и 2)



Рис 3



Pen

Рис 4

Шнур наконечника соедините с интерфейсом наконечника
(Делайте, как показано на рисунках 3 и 4)



Рис 5



Pedal

Рис 6

Шнур педали соедините с интерфейсом педали
(Делайте, как показано на рисунках 5 и 6)



2. Подключите адаптер постоянного тока к розетке.
3. Нажмите выключатель, чтобы появился интерфейс как на рисунке 7.



Рис 7

4. Щелкните на интерфейс (рисунок 7), чтобы появился интерфейс (рисунок 8).



Рис 8

5.Выбор режима.
Нажмите



чтобы появился интерфейс как на рисунке 9.

Рис 9



No.	Описание
1	Уровень
2	Регулировка скорости (увеличение)
3	Кнопка старт/ пауза
4	Регулировка скорости (уменьшение)
5	Клавиша возврата
6	Скорость
7	Кнопка выключения
8	Установка временных интервалов

6. Вставьте картридж с иглками. Выбор картриджа зависит от режима использования MTS (Микронидлинг) или PMU (перманентный макияж).

7. Нажимайте +/-, чтобы выбрать уровень скорости из 10 доступных. Чем выше уровень, тем выше скорость. Ручка перестанет работать при уровне скорости «0».

8. Нажмите >|, чтобы ручка начала работать. Или используйте педаль для управления наконечником.

9. Отрегулируйте глубину проникновения иглы (Максимальная глубина – 3.00 мм). Глубину проникновения иглы следует регулировать после начала работы ручки.

Режим PMU (перманентный макияж).

Принцип работы такой же, что и при режиме MTS.

Нажмите  для перехода в интерфейс как на рис 10)

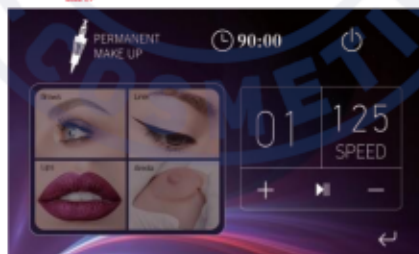


Рис
10

Выберите режим работы исходя из целей

Нажмите  и на дисплее появится изображение как на рис 11

- Брови: начинайте с уровня скорости 6

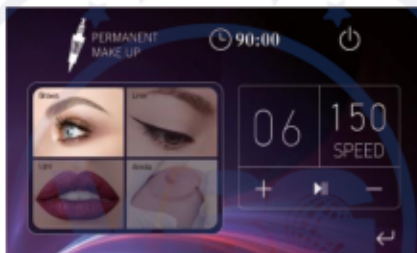



Рис11

Нажмите  На дисплее появится изображение как на рис 12

- Подводка для глаз: Начинайте с уровня скорости 4.

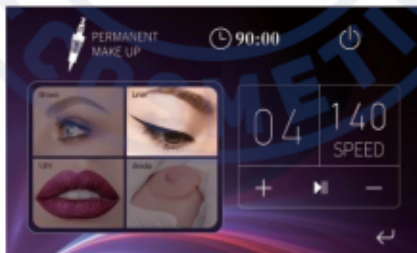



Fig 12



Нажмите  и на дисплее появится изображение как на рис 13
 ГУБЫ: Начинайте с уровня скорости 6

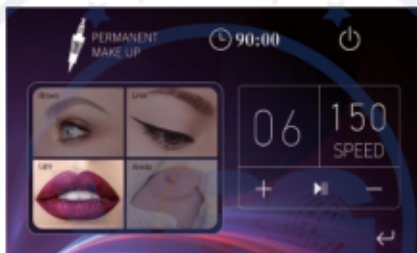


Рис13





Нажмите  и на дисплее появится изображение как на рис14
 - АРЕОЛА: Начинайте с уровня скорости 5



Рис 14

Нажмите  и на дисплее появится изображение как на рис 15
 Время по умолчанию – 90 минут.
 Максимальное время – 99 минут.

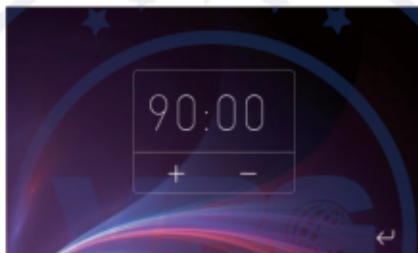


Рис 15

Выключите аппарат


Нажмите  и на дисплее появится изображение как на рис 16



Рис16

Используйте стилус для работы с дисплеем.



Полностью автоматический умный наконечник



В рабочем режиме. Ручка автоматически перестанет работать, когда окажется в исходном месте.

В рабочем режиме. Ручка начинает автоматически работать, когда ее снимают с места размещения.




1. Выньте картридж с иглами из стерильной упаковки.
2. Вставьте картридж горизонтально в круглый слот ручки.
3. Вставляйте картридж, вкручивая его по часовой стрелке. Вынимайте картридж, выкручивая его против часовой стрелки.
4. Регулировать длину иглы следует только после включения аппарата.



Регулировка глубины проникновения иглы

Вращайте иглу по часовой стрелке для увеличения глубины.

Вращайте иглу против часовой стрелки для уменьшения глубины.

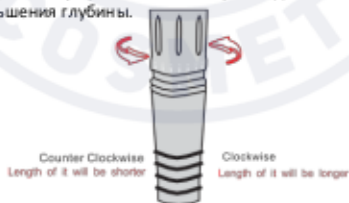



M1



L1



R3-M



R3-L



R5



F3



F4



F5



F7



F9



S3



S5



V9



V12



M9



M12



M24



M36



M42



Nano



P18

Информация об изделии	
Классификация	Содержание
Наименование модели	ARTMEX-V11
Запатентованное изделие	Да
Назначение	Перманентный макияж и микронидлинг
Адаптер	100V~240V
Вес	2900 гр
Размер	420мм*295мм*105мм

Комплектация

Деталь	Количество
Хост	1 шт
Наконечник	1 шт
Адаптер	1 шт
Педаль	1 шт
Стилус	1 шт

Техническое обслуживание

1.Общее техническое обслуживание

- Выключите аппарат. Протрите поверхность аппарата сухой тряпочкой.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или высоких температур, а также влажности.
- Не доверяйте ремонт аппарата непрофессионалам.

2.Профилактика

- Всегда проверяйте аппарат и адаптер перед использованием.
- Когда вы собираетесь использовать аппарат после длительного перерыва, проверьте безопасность его работы.



	Alternating current		Serial No
	Direct current		EU Representative
	Class II equipment		CE mark
	Attention, consult accompanying documents		Manufacturer
	Date of manufacture		Floating applied part
	Please be sure to read instructions before use and follow as described.		
	<p>Do not apply it to the man as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Who has acute disease or bloody disease over 38°C 2. Who has allergy and hemophilia 3. Who has melanocsis of the face 4. Who has high internal heat 5. Who regularly visits hospital 6. Who takes medicines 7. Who is under 12 years old 		
	Do not use it on the power other than AC 220V. It may cause fires or malfunction.		
	Do not use it near the place with high temperature, dust or humidity (Near the humidifier). It may cause malfunction.		
	Do not repair, disassemble or alter the controller and the body. It may cause malfunction.		
	Do not touch the device or detach the power cords with wet hands. It may cause electric shock.		
	Do not use the stripped cord or propped cord. It may cause fires(Be sure to replace it with another).		
	Do not use the propped cord which has crack or scars. It may cause scars on the skin.		
	When you don't use it for a long time, unplug it from the outlet.		
	Be sure to have an inspection for test, if any troubles are found, get it repaired.		
	No one other than the operator can touch it. It may cause accidents or malfunction.		

8 (800) 222-03-94
8 (495) 532-03-23

Приём звонков:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Artmex
MTS & PMU System

<https://vbg-cosmetic.ru/>