

VBG | COSMETIC

<https://vbg-cosmetic.ru/>

8 (800) 222-03-94

7 (495) 532-03-23

Make Better Beauty

**DUAL
SONIC**

DUALSONIC ПРОТОКОЛ

«Первый в мире патент» двухслойная технология HIFU

DUALSONIC - это запатентованная двухслойная технология, основанная на использовании высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука, проникающего в дермальные слои и слой SMAS, для придания коже упругости и улучшения качества кожи без операций.

JION MEDITECH

Основной протокол

Уход за лицом


Dual mode – это одновременное воздействие на глубину 3.0 и 4.5 мм, придающее стойкий эффект и высокую эффективность процедуре.

1. Щеки [Вертикаль]



10-15 линий, начиная чуть выше линии подбородка до скулы с использованием режима Dual (можно заменить режимом 3.0 или 4.5)

2. Щеки [Горизонталь]

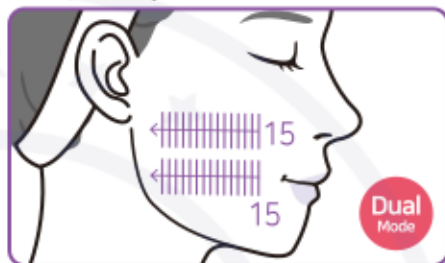

10-15 линий, начиная изнутри проводя под скулой наружу, с использованием режима Dual (можно заменить режимом 3.0 или 4.5)

3. Щеки [Диагональ]



10-15 линий, начиная от угла челюсти диагонально до скулы, используя режим Dual (можно заменить режимом 3.0 или 4.5)

4. Уход под глазами



Используя режим 3.0, под линией кости под глазами сделайте по 10 линий справа и слева (Внимание!) **Использование в глазницах строго запрещено!**

5. Височная часть



Используя режим 3.0, сделайте по 5 линий горизонтально и вертикально (Внимание!) **Использование в глазницах строго запрещено!**

6. Лоб



Используя режим 3.0, сделайте по 10 линий с каждой стороны (Внимание!) Не используйте между бровями!

7. Двойной подбородок



Используя режим 4.5, сделайте по 1-3 линии в зоне второго подбородка (Внимание! Не используйте на самой линии подбородка)

8. Лицо [Картридж для глаз]




Используйте режим 1.5, избегая запрещенных зон и тщательно проработайте все лицо круговыми движениями (1000 импульсов на уровне 5 и 3Гц занимает около 6 минут) (Внимание! Ознакомьтесь с запрещенными зонами)

Уход за шеей


Особый уход для шеи, используя картридж для лица в режиме 3.0 и картридж для глаз (Уровень 5/3 Гц)

1. Шея [Картридж для лица]

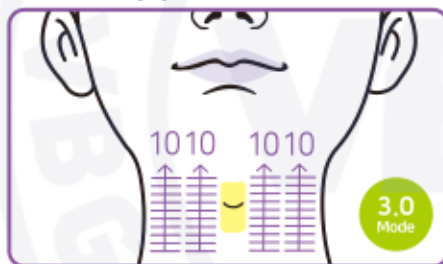

Используя режим 3.0, сделайте по 10 линий (Внимание! Не используйте на линии горла! Поскольку кожа на шее тоньше чем на лице, то может появиться покраснение. Отрегулируйте мощность)

2. Шея [Картридж для глаз]

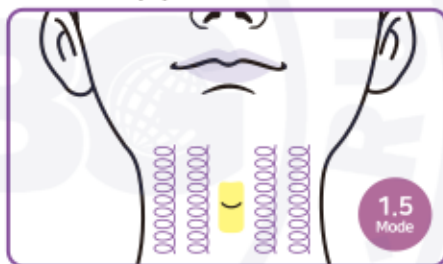

Используйте режим 1.5 (При уровне 5 и частоте импульсов 3Гц выпуск 300 импульсов занимает около 3 минут) (Внимание! Не используйте на линии горла! Поскольку кожа на шее тоньше чем на лице, то может появиться покраснение. Отрегулируйте мощность)

Уход за морщинами вокруг глаз

Интенсивный уход используя картридж для лица режимом 3.0 и картридж для глаз режимом на уровне 5 и частоте импульсов 3 Гц

1. Под глазами [Картридж для лица]



Используя режим 3.0 под линией кости под глазами сделайте по 10 линий справа и слева (Внимание! Использование в глазницах строго запрещено!)

2. Вокруг глаз [Картридж для глаз]



Используйте режим 1.5 и тщательно проработайте круговыми движениями, следуя за костью вокруг глаз (При уровне 5 и 3 Гц выпуск 250 импульсов занимает около 1,5 минуты)

DUAL Mode быстрый протокол


Двойной режим (DUAL Mode) это применение первой в мире двухслойной технологии одновременно на глубину 3.0 мм и 4.5 мм для запуска синтеза коллагена и эластина, а также для улучшения эластичности кожи и устранения морщин. Интенсивный уход двойным режимом применяемый на растянутый SMAS уровень, придает лицу четкий контур быстро и легко.

1. Щеки [Вертикаль]



10 – 15 линий, начиная чуть выше линии подбородка до скулы с использованием режима Dual

2. Щеки [Горизонталь]

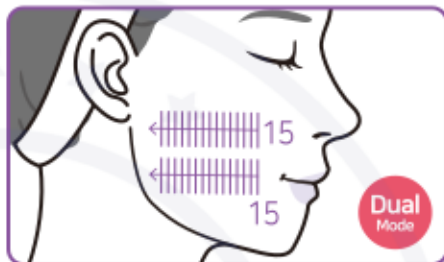

10 – 15 линий, начиная изнутри, проводя под скулой наружу используя режим Dual

3. Височная часть



Используя режим 3.0, сделайте по 5 линий горизонтально и вертикально (Внимание! Использование в глазницах строго запрещено!)

4. Лоб



Используя режим 3.0, сделайте по 10 линий с каждой стороны (Внимание! Не используйте между бровями!)

5. Уход под глазами [Картридж для лица]



Используя режим 3.0, под линией кости под глазами сделайте по 10 линий справа и слева (Внимание! Использование в глазницах строго запрещено!)

6. Лицо [Картридж для глаз]



Используйте режим 1.5, избегая запрещенных зон и тщательно проработайте все лицо круговыми движениями (1000 импульсов на уровне 5 и 3Гц занимает около 6 минут) (Внимание! Ознакомьтесь с запрещенными зонами)


Интенсивный протокол для подтяжки контура лица

1. Щеки [Вертикаль]



10-15 линий, начиная чуть выше линии подбородка до скулы, с использованием режима Dual

2. Щеки [Горизонталь]

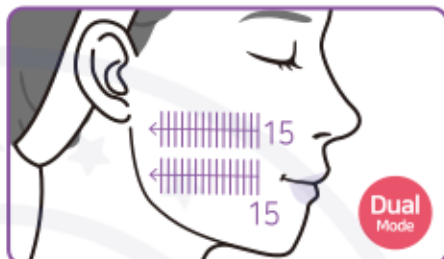

10-15 линий, начиная изнутри под скулой наружу, с использованием режима Dual

3. Щеки [Диагональ]




10-15 линий, начиная от угла челюсти диагонально с использованием режима 4.5

4. Двойной подбородок




Используя режим 4.5, сделайте по 1-3 линии в зоне второго подбородка. (Внимание! Не используйте на самой линии подбородка)

5. Щеки [Диагональ]

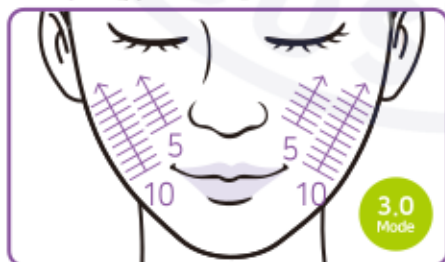


5-10 линий снизу вверх с использованием режима 3.0

Запрещенные зоны использования

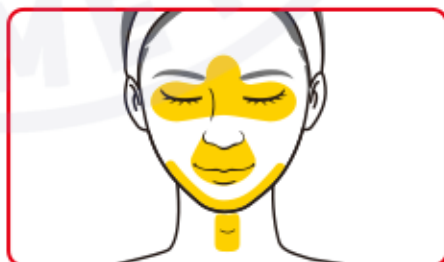

Не используйте аппарат внутри глазниц, на линии подбородка, в зоне вокруг рта и на межбровье.
 ※ Избегайте использования в местах имплантирования филлеров, жировых трансплантов и нитей для лифтинга.
 ※ Производитель не несет ответственности за какие-либо побочные эффекты при использовании в запрещенных зонах.

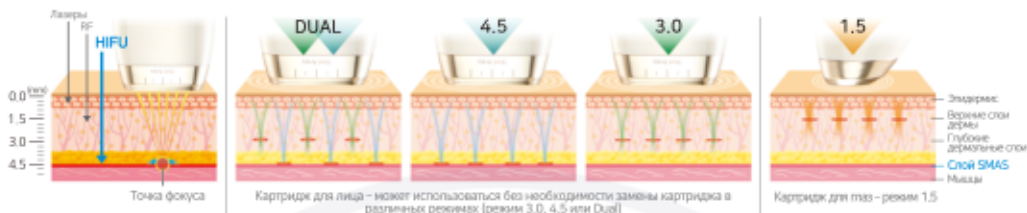

Результаты в зависимости от режима использования

Режим	Результат	Цикл использования
Режим DUAL	Одновременное воздействие на глубине 3,0 и 4,5 мм для продолжительного и эффективного результата в устранении морщин, улучшения эластичности и подтяжки лица.	1 раз с интервалом в 2 недели (в зависимости от состояния кожи)
Режим 4,5	Тепловая энергия передается в слой SMAS, который является основной причиной провисания кожи, тем самым обеспечивая его восстановление и продолжительный эффект лифтинга.	
Режим 3,5	Тепловая энергия передается в глубокие кожные слои, провоцируя синтез коллагена и эластина, а также помогает устранить морщины и повысить эластичность кожи.	
Режим 1,5	Тепловая энергия передается в верхние слои кожи, производя коллаген и эластин провоцируя синтез коллагена и эластина, а также помогает избавиться от мелких морщин.	

Метод контроля уровней энергии и режимов работы (глубина/Гц)

1. Контроль уровня энергии (для всех cartridge)

Быстрое нажатие кнопки режима/импульса для изменения уровня энергии



2. Контроль режима (глубины) cartridge для лица

Долгое нажатие кнопки режима/импульса в течении 2 секунд для изменения режима использования, который высветится на экране.



3. Метод контроля частоты импульсов в cartridge для глаз

Долгое нажатие кнопки режима/импульса для изменения уровня энергии



4. Метод использования кнопки режима/импульса в cartridge для глаз

Во время процедуры непрерывное нажатие кнопки режима/импульса означает непрерывную работу устройства с частотой выстрела (1 Гц/2 Гц/3 Гц) до тех пор, пока вы не прекратите ее нажимать.

※ Гц означает количество импульсов в секунду. (Чем больше Гц - тем выше скорость импульсов) [Например, 3 Гц 3 импульса/сек]

※ Внимание!

1. Необходимо нанести достаточное количество геля на рабочую зону и соблюдать плотный контакт аппарата с кожей.
2. Постоянно перемещайте cartridge для глаз избегая повторных выстрелов в одном и том же месте.
3. Убедитесь, что не используете DUALSONIC ручкой вверх (см. инструкцию стр.18)
4. Установите соответствующий уровень энергии и режим в зависимости от чувствительности и состояния кожи
5. Поскольку аппарат не водонепроницаемый, не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванна или бассейн. Это может привести к поломке аппарата.
6. Не храните аппарат при температурах ниже 0°C и выше 50°C.
7. Данный аппарат не рекомендуется для беременных или кормящих женщин, а также для использования на участках кожи с открытой раной.
8. Не рекомендуется использовать данный аппарат, если вы носите кардиостимулятор, подобные имплантированные устройства или при наличии металлического протеза.
9. Пожалуйста, используйте аппарат после тщательного ознакомления с инструкцией.



Обучающее видео
DUALSONIC