

Как использовать насадки				
No.	Questions	Fractional tip	Thermal tip	Plasma tip
1	Как использовать	Нанесите раствор на поверхность кожи. Во время работы с данной насадкой, слегка надавите на кожу, будто ставите печать.	Нанесите средство или крем на поверхность кожи. Затем проводите аппаратом следующими движениями: снизу в верх-изнутри наружу.	Каждая процедура зависит от заболевания и проблемы участка. Обычно, вспышка выходит из насадки, если Вы нажимаете на кнопку 'Shot' на расстоянии от 1-2 мм между кожей и аппаратом.
2	Отличия	С помощью данной насадки можно обрабатывать большие проблемные участки без повреждений на коже.	Стимулирует кожу через микроток и способствует выработке коллагена. Преимущество - безболезненные процедуры	Плазменные насадки создают короткую вспышку. эффективно используются в целевой области, не повреждая другие части кожи.
3	Эффекты	Угри, шрам, мелкие морщины, поры, Лечение кожи лица, лифтинг бровей.	Улучшение тона кожи, тонкие линии, поры, лифтинн, подтяжки	Родинки, синингома, бородавки, милия, мелкие татуировки, возрастное пятно и т.д.
4	Время пользования	5-15 минут	10-20 минут	Процедура зависит от поражения. (Проблема с кожей)
5	Время процедуры	Рекомендуется использовать его каждые 3-4 дня. Для чувствительной кожи рекомендуется использовать один раз в неделю.	Можно использовать каждый день.	Рекомендуется проводить процедуры каждые 3-4 дня. Для чувствительной кожи рекомендуется использовать один раз в неделю.

Тел. 8 (800) 222-03-94

Тел. +7 (495) 532-03-23

(Прием звонков с 9-00 до 18-00)

Сайт vbg-cosmetic.ru