

**VBG-COSMETIC**

***Dr. pen E30***

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД  
НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



## Название комплектующего

---





## Как пользоваться

### Беспроводная модель: Dr pen E30-W

Инструмент работает как от встроенного аккумулятора, так и при питании от сети переменного тока.


### Беспроводная модель: Dr pen E30-C

Инструмент используется только при питании от сети переменного тока.

1. Подключите адаптер постоянного тока к разъему
2. Подключите адаптер постоянного тока к розетке переменного тока.
3. Чтобы зарядить аккумулятор: подключите адаптер к розетке и подключите его к интерфейсу питания.

### Статус зарядки



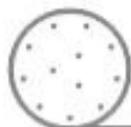

## Как пользоваться

### Подготовка

1. Извлеките модульную иглу из стерильной упаковки
2. Вставив круглую прорезь 1 в 2 машинки, протолкните модульную иглу в горизонтальном направлении до конца.
3. Закрепите модульную иглу, повернув ее против часовой стрелки.
4. Поверните модульную иглу по часовой стрелке и затем вытолкните ее в горизонтальном направлении, если хотите ее извлечь.



### 5. Запустите устройство

Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды, чтобы запустить или выключить устройство.

### Внимание

Чтобы хорошо защитить инструмент, не переворачивайте его, во избежание вытекания жидкости.




## Как пользоваться

---

### Регулировка длины иглы


Отрегулируйте глубину иглы, поворачивая кольцо регулировки масштаба.

При его повороте по часовой стрелке, глубина иглы будет меньше. При его повороте против часовой стрелки, глубина иглы будет больше

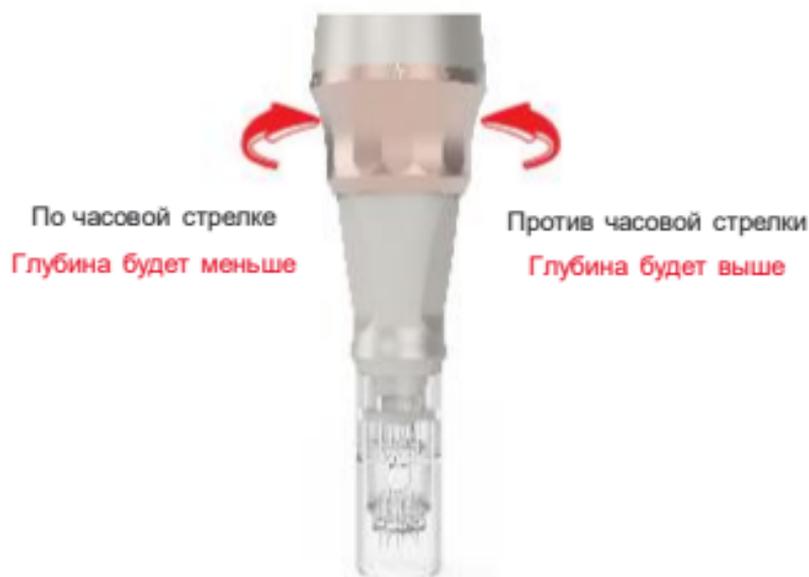

### Регулировка 5 скоростей

Машинка начинает с низкой скорости и постепенно набирает обороты  
Скорость меняется каждый раз при нажатии кнопки

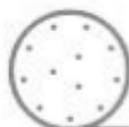

## Введение модульной иглы



L1



R3-M



R5



F3



F5



F7



F9



9



12



24




36



42



Nano

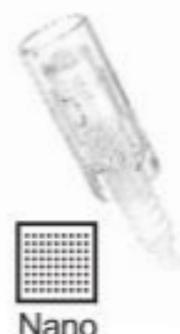

Nano



3DNano



SNano



## Характеристики

---

**Наименование продукта:**

**Моторизованная машина для мезотерапии Auto-Stamp**

Название модели: Dr pen E30

Адаптер: 5В-1000 мА

Вес упаковки: 318 г

Размер упаковки: 169\*123\*56 мм

### Товарная накладная

Предмет	Количество
Манипула	1 шт
Адаптер	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Силовой кабель	1 шт
Модульная игла	2 шт



## Меры предосторожности

	Обязательно прочтите инструкции перед использованием и следуйте их указаниям.
	Не применять к тем лицам: 1. У кого есть острое заболевание или болезнь крови при температуре выше 38С. 2. У кого есть аллергия и гемофилия 3. У кого меланоз лица 4. У кого повышенная температура тела 5. Кто постоянно посещает больницу. 6. Кто принимает лекарства 7. Кто младше 12 лет
	Не используйте его от источника питания, отличного от источника питания с напряжением 220 В переменного тока. Это может вызвать возгорание или неисправность.
	Не использовать в пыльных или влажных помещениях, местах с высокой температурой воздуха. (Рядом с увлажнителем). Может вызвать неисправность
	Не ремонтировать, не разбирать и не переделывать контроллер и корпус. Может вызвать неисправность
	Не прикасаться к устройству и не отсоединять шнуры питания мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
	Не используйте шнур с зачищенной изоляцией или подпорку. Это может вызвать возгорание (Обязательно замените его другим)
	Не используйте подпертый шнур, на котором есть трещины или изломы. Это может вызвать шрамы на коже.
	При неиспользовании в течение длительного времени, отключите устройство от розетки.
	Обязательно проведите осмотр для проверки. При обнаружении неисправностей отремонтируйте.
	Никому кроме оператора не разрешается прикасаться к устройству. Это может стать причиной несчастного случая или неисправности.

	Переменный ток		Серийный номер
	Постоянный ток		Представитель ЕС
	Оборудование класса I		Знак CE
	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации.		Производитель
	Дата производства		Незаземлённая рабочая часть



## Гарантия

---

Гарантийный срок на данное устройство составляет 6 месяцев. Мы предлагаем осуществлять поддержку наших изделий со дня их приобретения. Если какое-либо из наших изделий имеет повреждения или естественные проблемы, можем предложить их ремонт или замену

### **Общее техническое обслуживание**

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Храните устройство в выключенном состоянии. Протирайте поверхность устройства сухой тканью.

Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, воздействия высокой температуры и влажности.

Не разрешайте производить измерение, ремонт или изменение устройства неквалифицированному персоналу.

Если вы используете устройство, которое не использовалось в течение длительного времени, обязательно проверьте, не подвергает ли работа устройства опасности пользователя.

# **VBG-COSMETIC**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ООО «ВБГ Косметик»  
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2,  
Бизнес-парк Румянцево, корпус Г, офис 509Г.  
+ 8 (800) 222-03-94  
+ 7 (495) 532-03-23  
[www.vbg-cosmetic.ru](http://www.vbg-cosmetic.ru)