

# BEAUTY MONSTER BLACK

BEAUTY DEVICE

*Косметологическое  
устройство*

ООО «Восток Бизнес Групп»

Адрес: г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево» 22-й км Киевского шоссе, ДВЛД4, стр.2, корпус Г, оф.509

Тел. 8 (800) 222-03-94

Тел. +7 (495) 532-03-23

(Прием звонков с 9-00 до 18-00)

Сайт [vbg-cosmetic.ru](http://vbg-cosmetic.ru)



MEDISELOR

Total Beauty contents group

# Содержание

- Содержание
- BLACK - это?
- BLACK технические параметры
- BLACK Страны потребители
- BLACK набор
- BLACK способ использования
- BLACK меры предостережения
- Сертификаты



MEDISELOR

Total Beauty contents group

# BLACK это?



**BLACK** - это высокочастотный косметический прибор удобен в использовании в отличие от предыдущего сложного лазерного прибора.



Это модернизированный косметический прибор с усовершенствованными функциями и структурой предыдущей модели Beauty Monster (White).



Это устройство Micro Beauty 21 века, созданное Dr. Beaumont., специалистами, изучающими технологию прибора на протяжении 25 лет. Кроме того, было проведено множество тестирований.





# BLACK Технические параметры



Параметры	Beauty Monster Black	Продукция других компаний
Технология	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усовершенствованная мощность и частота</li> <li>2. Усовершенствован до 4-х уровней, упрощен принцип работы;</li> <li>3. Чётко определены фазы использования по соответствующим назначениям.</li> <li>4. На одном устройстве можно использовать разные запатентованные насадки (tip), посредством чего есть возможность наблюдать разные эффекты в использовании                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эффект плазмы</li> <li>- Эффект лифтинга</li> <li>- Сужение пор</li> <li>- Глубокое проникновение специального раствора</li> <li>- Подтяжка кожи и т.д.</li> </ul> </li> <li>5. Безопасно в использовании(программа fail-safe, система safe power)</li> <li>6.Использование безопасного материала sus316(хирургическая сталь)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При процедуре, занимающей дольше 10 минут отключается</li> <li>2. Отсутствие Fail-safety программы</li> <li>3. 1 насадка и только 1 способ использования</li> <li>4. <b>Использование</b> вредных для здоровья материалов</li> <li>5.Медь – <b>содержание свинцовых компонентов</b></li> <li>6. Железо – может вызвать <b>столбняк (опасность)</b></li> </ol>
Гарантия качества	A/S в течение 1 года	Даже при наличии периода A/S, A/S не гарантирован
Сертификаты	CE, FCC, KC	нет
Механические характеристики	Тип устройства	Beauty Monster Black косметологическое устройство
	Входной источник электроэнергии	AC 110~220V, 60hz
	Output	DC 24V 1A
	Размер/вес устройства	160X25X25mm / 50g
	Размер/вес упаковки	115X70X185mm / 400g



Plasma tip

## Описание:

При использовании Plasma tip, в тканях кожного покрова возникает небольшая плазменная искра, которая термально воздействует на поверхность кожи, тем самым максимизируя воздействие на малую область при минимизации побочного действия на окружающую ткань

## Эффекты:

Может использоваться для многих проблем кожи, таких как родинки, сириногома, бородавки, милиум, неглубокие татуировки, возрастные пятна и др.



Fractional tip

## Описание:

Fractional tip стимулирует кожу, создавая большое количество маленьких зон термального воздействия на поверхность кожи, не оказывая влияния на ткань клеток кожи.

## Эффекты:

Его можно использовать для лечения многих проблем с кожей, таких как угри, шрамы, мелкие морщины, поры, при лечении кожи лица, подтяжки верхнего и нижнего века, лифтинга бровей и др.

Кроме того, можно вводить различные полезные растворы глубоко в кожу через маленькие невидимые для глаз "отверстия".





Thermal tip

## Описание:

Thermal tip использует микротоки для передачи тепла глубоко в кожу без боли, способствуя регенерации кожи

## Эффекты:

Может применяться при мелких морщинах, для лифтинга, сужения пор, подтяжки кожи, введения полезного раствора и т.д.



# BLACK Страны потребители



## Структура устройства:

- Корпус косметологического устройства BLACK
- 10x Plasma tip
- 1x Fractional tip
- 1x Thermal tip
- Переносной футляр



..... 10x Plasma tip



..... 1x Fractional tip



..... 1x Thermal tip



# BLACK способ использования



1. Прикрепите насадку (Tip) к устройству.
2. Подсоедините адаптор питания к устройству.
3. Нажмите кнопку 'On/off' и удерживайте в течение нескольких секунд.
4. Установите мощность(power) и частоту (frequency).
5. Снова нажмите 'on', когда 'power' замигает, то устройство готово к использованию.
6. При нажатии и удерживании кнопки 'Shot' устройство работает, при отпускании-отключается.
7. После использования нажмите 'on' и удерживайте , чтобы отключить питание.
8. Проводя процедуру не держите насадку(tip) на одном месте, двигайте слева направо
9. Не делайте процедуру долго за 1 раз, процедуру следует выполнять недолго по несколько раз.
10. Для начинающих рекомендуется попрактиковаться на фруктах.







# BLACK Меры предосторожности

---

- \* В течение 3х дней после процедуры запрещается находиться под воздействием прямых солнечных лучей и посещать сауну.
- \* Если появилась корочка постарайтесь, чтобы она не оторвалась и не повредилась.
- \* Если вы делали процедуру на верхнем веке или лифтинг, чтобы снизить температуру там лучше приложить пакет со льдом (от 30 минут до 1-2 часов в зависимости от человека).
- \* Если намеренно убрать корочку, то может остаться шрам, поэтому лучше не трогать её, пока она сама не сойдёт.
- \* Если участок поражения глубокий, не нужно делать процедуру за 1 раз в течение длительного времени, лучше повторите процедуру несколько раз с перерывами.
- \* Проводя процедуру, не задерживайтесь только на одном месте, постоянно двигайте устройство.
- \* Используйте насадку(tip) в течение короткого времени по несколько раз.
- \* При воздействии устройством на одном месте глубина воздействия увеличивается, из-за чего может образоваться шрам.





## CE Certificate



## FCC Certificate



## KC Certificate

