

Официальный дистрибьютор

VBG | COSMETIC

www.vbg-cosmetic.ru

AQUA GEN 2

“Красота кожи начинается с чистой кожи”

AQUA GEN

INDEX

1. Что такое AquaGen2?

2. 3 особенных функций AquaGen2

3. Специальное решение Aqua Gen2

4. Before & After после
использование AquaGen2

5. Тритмонт

6. Спецификаций AquaGen2



1. Что такое AquaGen2 ?.

В короткие сроки быстро и эффективно питает кожу


Сделать чистую и сияющую кожу с помощью 3 этапной функцией

AquaGen это мультифункциональный аппарат. С помощью пилингового солюшена бережно удаляет омертвевший слой кожи и помогает циркуляцией лимфы. Активные вещества легко проникают в кожу с помощью функций гальваники.



2. 3 основных функций Aqua Gen .

1. Эффект мягкого пиллинга путем глубокого прищипывания под давлением с использованием раствора АНА кислот которые с легкостью убирает высасывает черные точки ,белые камедоны,сальные жиры ,омертвевшую клетку, демодекс.
2. Функция распыление - используя спрей пистолет с ампулой по типу кожи внедряет активные вещества глубоко.
3. Функция электрофореза - функция электрофореза позволяет малым токам проходить через кожу, используя свойства электрического полюса, ионизированный водный раствор глубоко проникает в кожу.

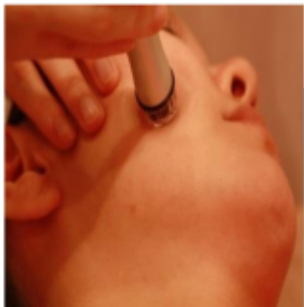

01

Аквапил(поры,кератин)



02

Распыление(мелкое распыление)



03

Электрофорез



2. 3 основных функций Aqua Gen .

01. Очищение пор и отшелушивания

Процедура двойного пиллинга



Spiral therapy Tip

Удаление отходов внутри пор



2 вида солюшен


После растворение отходов,
введение увлажняющей
раствор

2. 3 основных функций Aqua Gen .

01. Очищение пор и отшелушивания

Процедура двойного пиллинга

Spiral therapy Tip

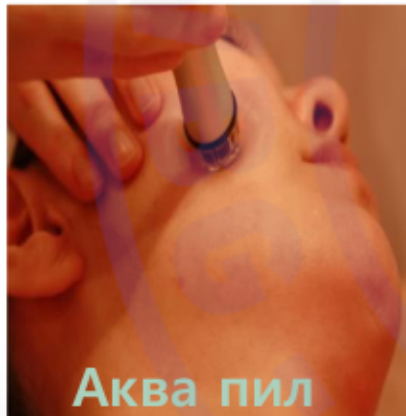

Отшелушивание
и очищение пор

Сальные жиры,
Отходы,

Увлажнение
Успокаивание
Контроль
кожного сала

1. Экструзия отходов, сальных жиров
2. Подходит размер для узких областей таких как нос

***Аппарат работает по принципу вассит.**

Процедура двойного пиллинга

2 Вида солюшен

Молочная кислота 0.001%

Водорастворимые эксфолианты, растворяют поверхность кератинов.

Для нормального типа кожи, пигментные пятна, морщины.

Салициловая кислота 0.001%

Жирорастворимый отшелушитель, очищает внутренность пор от сальных желез.

Акне кожа, толстая кожа с высокой секрецией сала и большими порами.



2. 3 основных функций Aqua Gen .

02. Распыление



Сияющая чистая кожа благодаря распылению
Мелкое распыление с помощью спрей пистолета



6Видов ампул для использование спрей пистолета

HYALURONSAN, BETA_GLUCAN , COLLAGEN, BIFIDA, ALOE, GALATOMYCES

Спрей

2. 3 основных функций Aqua Gen .

- 6 видов солюшена для AQUA GEN

Против старение

COLLAGEN

Регенерация,осветление,
упругость морщин

GALATOMYCES

Ферментированные дрожжи,
Отдых для
кожи,упругость ,увлажнение
очищает , осветляет

BIFIDA

Ферментированные вещества
,осветление,устранение морщин,
упругость,сияющая кожа,
Укрепляет кожаный барьер



Питание

ALOE

Увлажняющий состав,успокаивает,
регенерация кожи, повышает
иммунитет кожи

BETA_GLUCAN

Питание кожи,успокаивает,
предотвращение страение,
Повыщает иммунитет ,мощный
состав котрый способствует
увлажнению кожи

HYALURONSAN

Мощное увлажнение

2. 3 основных функций Aqua Gen .

03. Электрофорез

Прицип работы электрофорез

1мА проникновение микротоков

- Закон Гальваника был открыт италянским ученым Гальваником

Непрерывный и регулярный поток в теле

- Распространение по всей клетке кожи
- активация ткани , химическое и физичекая реакция

Похожие полюса выталкивают друг друга,противоположная полярность притягивается

- Внедрение активных ингредиентов в кожу
- Отправляет наружу ненужные отходы



2. 3 основных функций Aqua Gen

03. Электрофорез

Эффект от тока электрофореза



- Катодная (-) щелочная реакция
Проникновение щелочного вещества
Нервная Стимуляция
Активация эффекта

- Влияние зазоров
Способствует циркуляции крови
Способствует циркуляции лимфы

- Биполярная кислотная реакция
Кислотное проникновение
Успокоение нервной системы

2. 3 основных функций Aqua Gen

03. Электрофорез

Эффект электрофореза и способ применения

Эффективность

- Концентрированный активизатор может проникнуть в глубокие слои кожи .
- Высокая впитываемость.
- Улучшает лимфо и кровообращение.
- Регенерация кожи улучшается .
- Выброс отходов из кожи.
- Удаляет кожаное сало и мертвые клетки кожи в волосяных фолликулах.
- Предотвращает появлению пигментных пятен и осветляет кожу.

Меры предосторожности

- Металлическая пластина в организме человека ,
- Сахарный диабет,
- Беременным строго запрещается


Метод использования



Во время всей процедуры манипула не должна отподать с лице.

2. 3 основных функций Aqua Gen.


Complex A

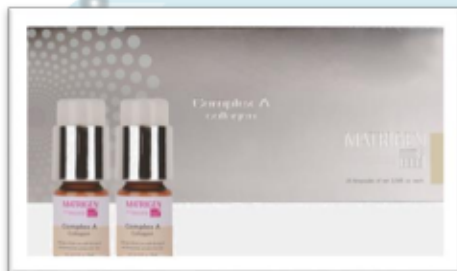

100% коллагеновая пудра

Комбинация раствора и пудры усиливает увлажнение. Ампула очень эффективна для устранения морщин

Complex C


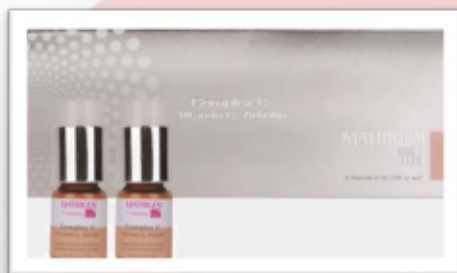


100% пудра Витамин С

Благодаря 100% составу витамина С позволяет держать состояние кожи светлой и чистой

4. Использование AquaGen Before & After

Прощайте сальные
жиры ,отходы
Bye Bye!!!

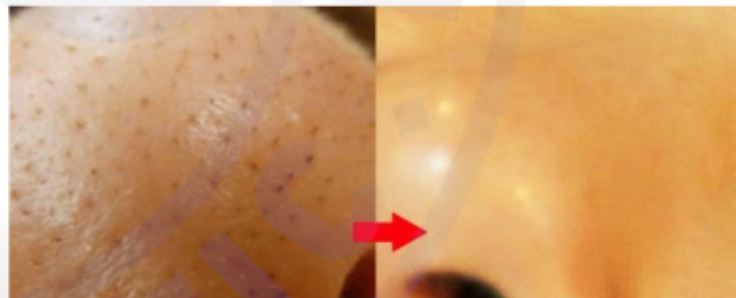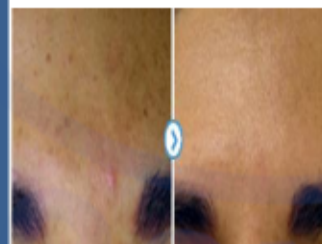


Эластичность кожи
Предотвращает
старение кожи

Устранение
демодекоза

Увлажненная кожа




4. Использование AquaGen Before & After

Прощайте подкожные сальные жиры, отходы, камедоны

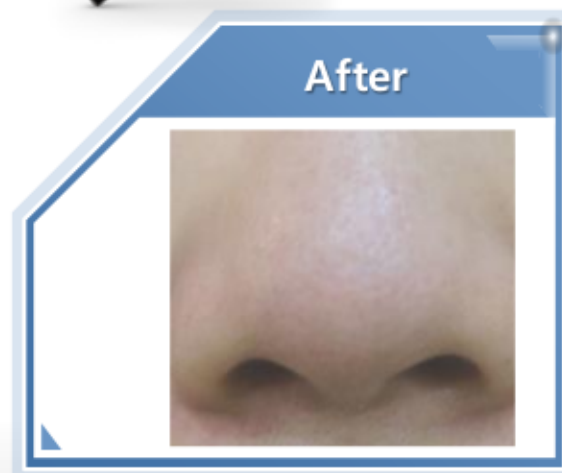

4. Использование AquaGen Before & After

Прощайте отходы, камедоны

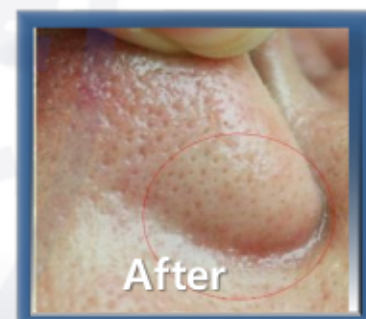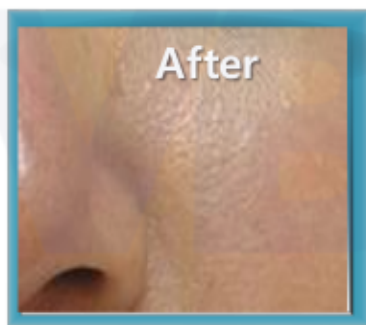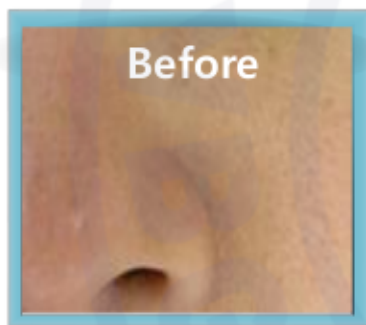

COSMETIC

-Разновидность программы

Комбинированная программа Быстрый лифтинг, обновление.

Одновременная программа увлажнения + пиллинг + лифтинг, которая придает эффект моментально и быстро, после процедуры кожа чистая, сияющая и увлажненная.

Автономная программа

Это быстрая программа, которая одновременно решает сложные проблемы с кожей у молодых людей, живущих в мегаполисе и в занятой жизни.

Программа обновление

Расслабляющая процедура, которая регенерирует кожу для современных людей, живущих в насыщенной повседневной жизни.

6. Aqua Gen SPECIFICATION

SPECIFICATION



- Название модели: Aqua Gen 2
- Размер : 450*190*210
- Вес :9kg
- Входящая мощность: 220v 50/60hz
- Мощность потребления : 80w