

# ***Dr. pen***

*Auto Microneedle System*



**Руководство  
пользователя**

**НЗ**

**Прочтите руководство перед использованием**



# Содержание

---

1

Описание изделия .....	2
Наименование деталей .....	3
Правила использования .....	4
Правила использования .....	5
Регулировка длины .....	6
Отображение и регулировка скорости .....	6
Инструкция для беспроводного режима .....	7
Как зарядить аккумулятор .....	7
Введение картриджа .....	8
Характеристика .....	8
Меры предосторожности .....	9
Гарантия .....	10



Устройство состоит из аппарата и одноразовых картриджей.

В настоящем руководстве подробно объясняется, как использовать каждый компонент.

Устройство используется для улучшения внешнего вида кожи и уменьшения признаков старения. Оно предназначено для стимуляции кожи для выработки коллагена и эластина.

Микроканалы, созданные устройством на поверхности кожи, также способствуют впитыванию сывороток. Для устройства разработано 3 различных типа картриджей.






1. Достаньте картридж из стерилизованной упаковки (рис. 1)



2. Держите корпус картриджа в том же направлении как на (рис. 2). Поместите эссенцию в пустой корпус картриджа

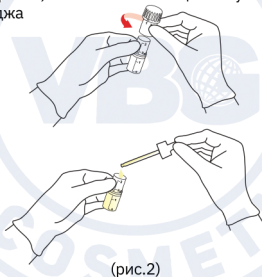

3. Плотно прикрутите верхнюю часть картриджа к корпусу (рис.3)





Выберите подходящий уровень расхода в зависимости от консистенции эссенции.

1. Совместите точку крепления защитной крышки с точкой шкалы регулирующего кольца (рис. 4)

2. Отрегулируйте поток эссенции, повернув защитную крышку.

Число, совпадающее с точкой расположения защитной крышки показывает текущий уровень расхода эссенции (рис. 5).

Установите регулировочное кольцо на уровень 1, если эссенция жидкая. Установите регулировочное кольцо на уровень 3, если эссенция густая.




(рис.4)




(рис.5)

3. Снимите защитную крышку. Поместите картридж в ручку (рис. 6)

4. Поместите стопорное кольцо на ручку (рис. 7)

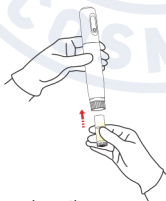

(рис.6)

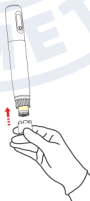

(рис.7)



Используйте подходящий размер в зависимости от области обработки и проблем с кожей.

Отрегулируйте глубину поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину иглы следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину. (рис. 8)



## Отображение и регулировка скорости

Экран отображения скорости



6 Регулировок скорости

Зажмите кнопку питания на 2-3 секунды, чтобы запустить или выключить устройство. После запуска устройства, скорость меняется каждый раз после того, как нажимают на кнопку включения.



Данная модель работает от встроенного аккумулятора. Она может работать без провода. Кабель питания и адаптер используются для заряда аккумулятора устройства.





## Как зарядить аккумулятор


Подключите кабель питания с адаптером к интерфейсу питания устройства и подключите адаптер к розетке переменного тока, чтобы зарядить устройство. Заряда хватает на 2 часа.

Число скорости медленно мигает, когда уровень заряда батареи достигает 10%.

Аппарат автоматически выключится после того, как показатель скорости быстро замигает в течение 1 минуты.

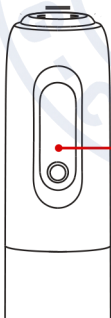

Ручка показывает  при перезапуске после автоматического отключения из-за низкого заряда батареи.

Ручка показывает вращение  во время зарядки.

Ручка показывает  когда батарея полностью заряжена.





Nano-HS



Nano-HR



H12

Картридж одноразовый и предназначен только для Hydra.pen H3.

Пожалуйста, стерилизуйте картридж в течение нескольких минут перед использованием.

Выбрасывайте использованный микроигольчатый картридж в мусорный контейнер.

Чтобы защитить прибор, не переворачивайте его, это предотвратит обратный поток жидкости.



## Характеристика

Название модели: Hydra.pen H3

Вход адаптера: 100-240В 50/60 Гц

Выход: 5В — 2А

Размер упаковки: 169\*123\*56 мм

### Комплектация

Позиция	Кол-во
Ручной блок	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Руководство	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Картридж	2 шт.



	Обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием прибора и следуйте инструкциям.		
	<b>Противопоказания:</b> 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38°C 2. Аллергия и гемофилия 3. Меланоз на лице 4. Высокая температура 5. Постоянные визиты к врачу 6. Прием лекарственных препаратов 7. Возраст до 18 лет		
	Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.		
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя).		
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.		
	Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.		
	Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к возгоранию (обязательно замените его на новый).		
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут оцарапать кожу.		
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.		
	Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.		
	Никто, кроме оператора, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.		
	Переменный ток		Серийный №
	Постоянный ток		Производитель
	Дата изготовления		CE маркировка
	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации		Обратитесь к инструкции по использованию



Гарантийный период изделия составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услугу ремонта, начиная с даты покупки. В случае, если наша продукция имеет повреждения или неисправности естественного характера, мы предоставляем замену или ремонтное обслуживание.

Применение сторонних картриджей может вызвать повреждение изделия и привести к отмене гарантии.

### **Общее техническое обслуживание**

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется. Протрите его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Обязательно очистите такие области, как щели, швы и области вокруг места крепления картриджа к устройству

Держите его вдали от прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности.

Не доверяйте ремонт устройства непрофессионалу.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасно.

***Dr. pen***



*Auto Microneedle System*